

# cardiolife AED

Automatischer externer Defibrillator

**AED-2100**



*Fighting Disease with Electronics*

 **NIHON KOHDEN**



# Only 3 steps to save a **l i f e**

## Schritt 1. AED einschalten

Sobald der AED eingeschaltet wird, öffnet sich automatisch die Geräteklappe. Einfache Sprachanweisungen führen durch den gesamten Wiederbelebungsprozess.

## Schritt 2. Einweg-Elektroden anlegen

Die AED-Elektroden sind bereits an das Gerät angeschlossen. Die linke und die rechte Seite müssen nicht unterschieden werden. Lediglich die Schutzfolie muss entfernt werden bevor die Elektroden auf die Brust des Patienten geklebt werden.

## Schritt 3. Schocktaste betätigen

Nachdem die Elektroden auf der Brust des Patienten angelegt sind, wird die Analyse automatisch gestartet. Sobald der AED erkennt, dass eine Defibrillation erforderlich ist, muss nur noch die blinkende Schocktaste betätigt werden.

Jeder kann Leben retten!

## Selbsttest für die Funktionsfähigkeit

Der AED verfügt über eine Selbsttestfunktion zur täglichen sowie monatlichen Überprüfung.



### Systemtest

Zeigt mit grüner und roter Kontroll-Lampe den aktuellen Betriebsstatus an.



### Batterietest


Zeigt die verbleibende Kapazität der Batterie sowie mögliche Fehlfunktionen an.



### Test der Elektroden

Die Anschlüsse der NIHON KOHDEN Elektroden verfügen über eine spezielle Technologie\*, um deren Zustand zu überprüfen und anzuzeigen.

\*Patentschutz

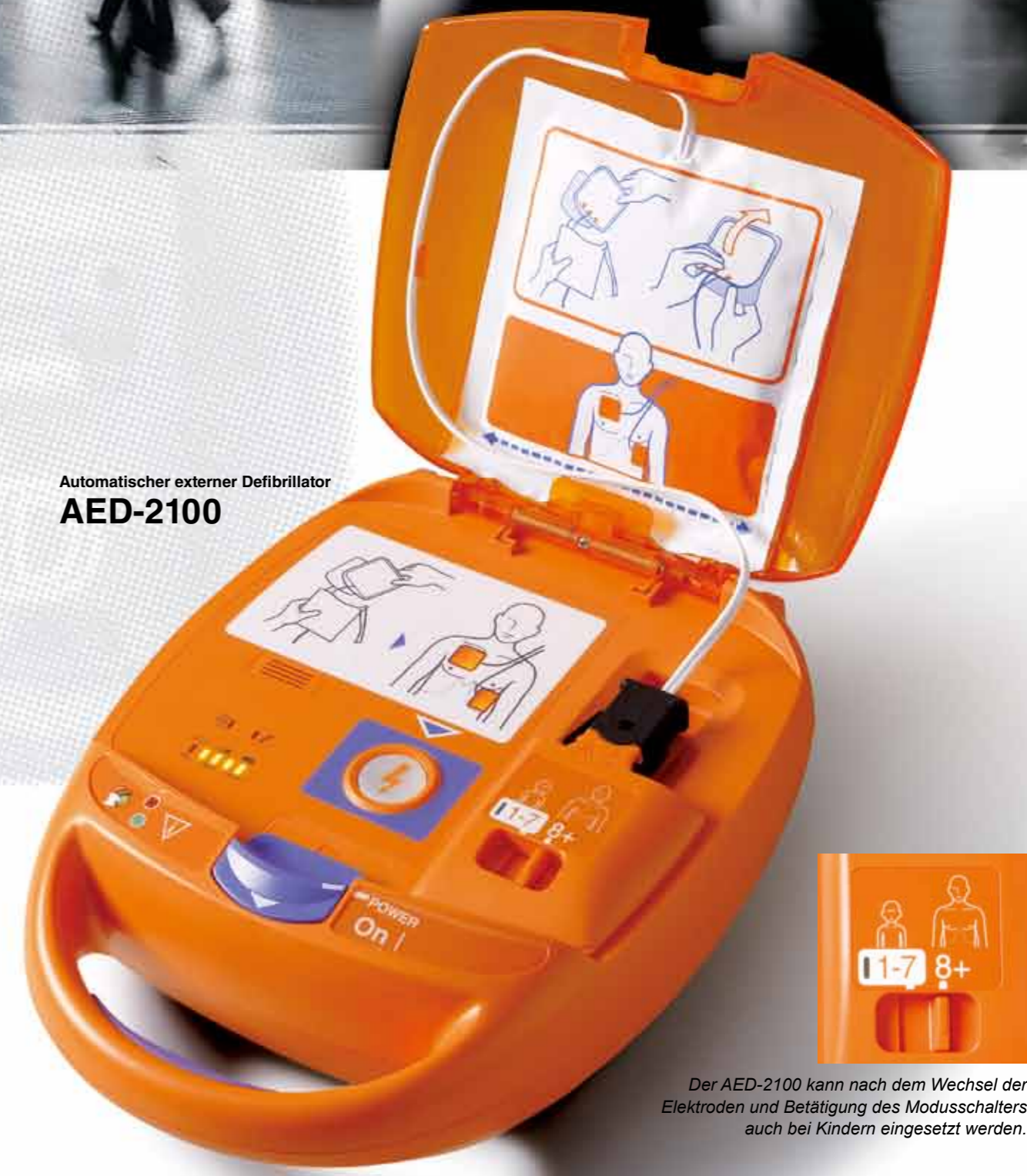

Automatischer externer Defibrillator  
**AED-2100**



Der AED-2100 kann nach dem Wechsel der Elektroden und Betätigung des Moduswählers auch bei Kindern eingesetzt werden.

## Daten speichern und auf einem PC wiedergeben

Der AED-2100 kann EKG-Daten mit Ereignismarkierungen über einen Zeitraum von 90 Minuten speichern. Anschließend können diese Daten zur Diagnose an einem PC befundet werden.



## Bluetooth-Schnittstelle


Die Wiederbelebungsdaten und Ergebnisse der Selbsttests können über eine drahtlose **Bluetooth** Verbindung an einen PC übertragen werden.

Der Begriff **Bluetooth** sowie das Logo sind registrierte Warenzeichen und Eigentum von Bluetooth SIG, Inc.



## Optionen

- AED-Box (YZ-042H8)

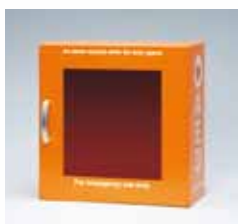

- AED-Wandhalterung (KG-202V)



- Batteriepaket (SB-210VK)

- Defibrillator-Elektroden:  
für Erwachsene (H324C), für Kinder (H324E)

- Tragetasche (YC-210V)

- AED Report Wiedergabesoftware (QP-210VK)

- Trainingsgerät (TRN-2100)

- Elektroden zum Trainingsgerät:  
für Erwachsene (H326A), für Kinder (H326B)

- Ersatzaufkleber für Training-Elektroden (Y262A)

*Save a life with cardiolife AED*



Technische Änderungen vorbehalten.



NIHON KOHDEN EUROPE GmbH  
Raiffeisenstraße 10, 61191 D-Rosbach  
Telefon: +49 (0) 60 03 / 8 27-0, Telefax: +49 (0) 60 03 / 8 27-5 99  
Internet: [www.nihonkohden.de](http://www.nihonkohden.de), E-Mail: [info@nke.de](mailto:info@nke.de)