

Gebrauchsfertiges
Sprühdessinfektionsmittel für alle
alkoholbeständigen Oberflächen
und Gegenstände
aldehydfrei



Desinfektion

Medizid Rapid

DGHM
gelistet

VAH
zertifiziert



CE 0124

Rösner-Mautby
Meditrade GmbH
Kiefersfelden
GERMANY

WIRKUNGSSPREKTRUM:

MEDIZID RAPID wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae), begrenzt viruzid und ist damit umfassend wirksam gegen alle behüllten Viren (BVDV/Vaccinia inkl. HBV, HIV, HCV). Darüber hinaus wirkt MEDIZID RAPID gegen Rota- und Noroviren.

REF	Artikel	Karton	Europalette
01002	250 ml Flasche	12 x 250 ml	130 Karton
00976	1 l Flasche	12 x 1 l	32 Karton
00977	5 l Kanister	2 x 5 l	52 Karton

Zubehör	REF	Artikel
	00930	Dosierpumpe 1 l
	00995	Sprühkopf 1 l
	00931	Kanisterdosierpumpe 5 l
	00932	Kanisterschlüssel 5 l
	00996	Kanisterhahn 2 l + 5 l

Rösner-Mautby Meditrade GmbH, Thierseestraße 196, D-83088 Kiefersfelden
Telefon 08033/9760-0, Telefax 08033/9760-60, E-mail: office@meditrade.de, www.meditrade.de

Gebrauchsfertiges
Sprühdeshektionsmittel für alle
alkoholbeständigen Oberflächen
und Gegenständen



Medizid Rapid

ZUSAMMENSETZUNG:

In 100 g sind enthalten:

30 g 1-Propanol
15 g 2-Propanol
10 g Ethanol
0,05 g Didecylmethylammoniumpropionat
0,02 g Alkylaminguanidindiacetat

Weitere Bestandteile:

Duftstoffe, Nichtionische Tenside.

PRÄPARATETYP/ANWENDUNGSBEREICHE

MEDIZID RAPID ist ein gebrauchsfertiges, sehr schnell wirkendes Präparat zur Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen medizinischer Geräte und Gegenstände im patientennahen Umfeld in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen. Ebenso geeignet für Laboratorien, Industrie, Küchen- und Lebensmittelbereiche. Ideal für Bereiche, in denen zwischen Behandlungen und Eingriffen sehr kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. MEDIZID RAPID ist ein alkoholisches Produkt. Vor Gebrauch stets Produktinformation lesen. MEDIZID RAPID kann als Dual-Use Produkt eingesetzt werden (Biozid und Medizinprodukt der Klasse II a).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- gebrauchsfertig
- aldehydfrei
- sehr schnell, bereits in 30 Sek., umfassend wirksam
- rückstandsfrei
- gute Materialverträglichkeit

VORSICHTSMAßNAHMEN/WARNHINWEISE:

Beim Umgang mit dem Konzentrat gemäß Gefahrstoffverordnung: Entzündlich. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Berührung mit den Augen gründlich abspülen und Arzt konsultieren. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Beim Umgang mit dem Produkt Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht über 50°C lagern.

DOSIERUNG:

Bakterizid, fungizid, tuberkulozid

DGHM / VAH-Liste	Konz. / 5 Min.
M.-terrae	Konz. / 30 Sek.

Behüllte Viren

BVDV/Vaccinia	Konz. / 30 Sek.
HBV / HIV / HCV	Konz. / 30 Sek.

Unbehüllte Viren

Rotavirus	Konz. / 30 Sek.
Norovirus	Konz. / 5 Min.

ANWENDUNG:

MEDIZID RAPID ist gebrauchsfertig. Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände sind bis zur vollständigen Benetzung einzusprühen. Einwirkzeit: 30 Sek., Fläche ggf. mit trockenem, sauberem Tuch trockenwischen.

BEGUTACHTUNG:

Flächendesinfektion gemäß den Standardmethoden der DGHM

Hygiene Nord GmbH, Greifswald, 2004
Prof. med. R. Schubert, Frankfurt, 2001
Prof. med. W. Solbach, Lübeck, 2001
Prof. med. R. Schubert, Frankfurt, 2003

HBV-/HIV-Wirksamkeit:

Dr. Steinmann, Bremen, 2000

Zur Wirksamkeit gegen BVDV(HCV)/Vaccinia

Dr. Steinmann, Bremen, 2004

WEITERE ANGABEN:

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Größere Produktreste in der Originalverpackung der Problemabfallentsorgung zuführen.

Hinweis:

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.