

Produktdatenblatt für PSA

# HERZmed® Gesichtsschild BASIC

Stand 08/2020  
Version 1.0



<b>REF:</b>	HZ-20001	<b>GTIN:</b>	4251697700193
<b>VE:</b>	1 Stück		
<b>Hersteller:</b>	HERZmed GmbH Siegeldorfer Str. 15 90768 Fürth	herzmed@herzmed.de www.herzmed.com	

<b>Klassifizierung:</b>	Kategorie II der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen Persönlicher Augenschutz nach EN 166:2001 (6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.7, 7.2.4, 10)
<b>Zweckbestimmung:</b>	<p>klares, beschlagungsarmes Gesichtsschild zum Schutz gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten reduziert Gefährdung durch Tröpfcheninfektion wie z.B. COVID-19 reduziert die Ausbreitung von COVID-19</p> <p>KEIN Schutz gegen mechanische Reize, Stöße, Splitter, mechanische Teile o.Ä. Konstruktionsbedingt KEIN vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien</p> <p>Anwendungen im medizinischen Bereich, Pflege, Rettungswesen u.a. von COVID-19 betroffene Arbeitsbereiche</p> <p>Zum einmaligen Gebrauch bestimmt, Anwendung nur durch eine Person</p>
<b>Anwendungshinweis:</b>	<p>Vor Gebrauch Schutzfolien an Innen- und Außenseite abziehen</p> <p>Kann mit einer persönlichen korrigierenden Brille, Schutzbrille oder Atemschutzmaske kombiniert werden Kombination mit einer Atemschutzmaske bei Gefährdung durch COVID-19 empfohlen</p> <p>Gesichtsschild austauschen bei Schäden wie Kratzer, Risse etc., Änderungen in Form und Farbe zu erkennen oder wenn es Chemikalien, Ölen oder Fette, großer Hitze oder längerer Sonneneinstrahlung ausgesetzt war</p> <p><b>ACHTUNG!</b> Schäden sind möglicherweise nicht sichtbar</p>

<b>allgemeine Attribute:</b>	Transparent und beschlagungsarm hautfreundlich geringes Gewicht (4,1g) für längere Tragedauer hoher Komfort und optimaler Sitz	
<b>Maße (L x B x H):</b>	Schutzschild:	33 x 22 x 0,03 cm
	Elast. Kopfband:	11 x 0,4 x 0,1 cm
<b>Material:</b>	Sichtscheibe:	PET
	Stirn-Schutzpolster:	PU-Schaum
	Elastisches Band:	Polyester, Latex

<b>Lagerung:</b>	max. Lagerdauer 1 Jahr vor Nässe und Sonneneinstrahlung schützen	
<b>Entsorgung:</b>	Nach Gebrauch entsorgen  Bei Kontakt mit Blut oder Sekret/Exkret als Sondermüll zu entsorgen. Wenn kein Kontakt zu den oben genannten Substanzen bestanden hat, über den Hausmüll, idealerweise in einem separaten Kunststoffbeutel verknötet, entsorgen. Die PET-Sichtscheibe kann recycelt werden. Entsprechenden Vorschriften von Betreibern von Gesundheitsorganisationen ist Folge zu leisten.	
<b>Aufbereitung:</b>	Es handelt sich um ein Einmalprodukt, welches nach der Anwendung entsorgt wird und keinesfalls für mehrere Patienten verwendet werden darf.	
<b>Hinweis:</b>	Keine schädlichen Wirkungen wie Hautreizungen oder allergische Reaktionen bekannt Allergische Reaktionen bei Hautkontakt möglich ACHTUNG! Kopfband enthält Latex  Das Gesichtsschild erfüllt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.	